


아이리스10S 앱 사용방법

* 처음 사용시 충전 완료 후 사용해 주세요.

제품설치

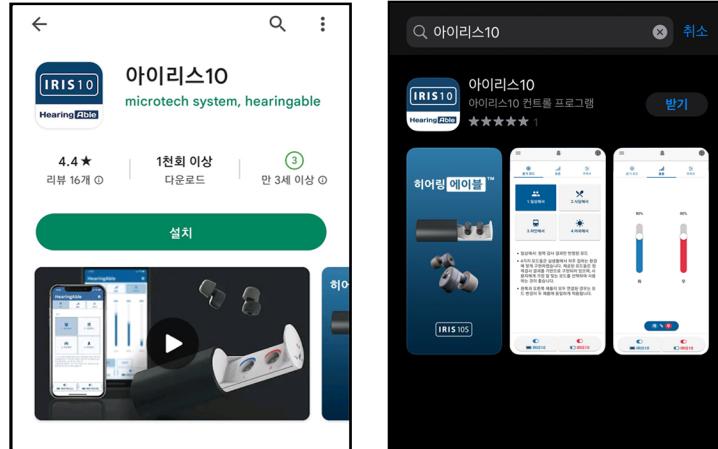


구글 플레이스토어 또는 앱 스토어에서
“아이리스10”을 검색합니다.




제품연결

* 비프음을 통해 선택한 제품을 확인 가능

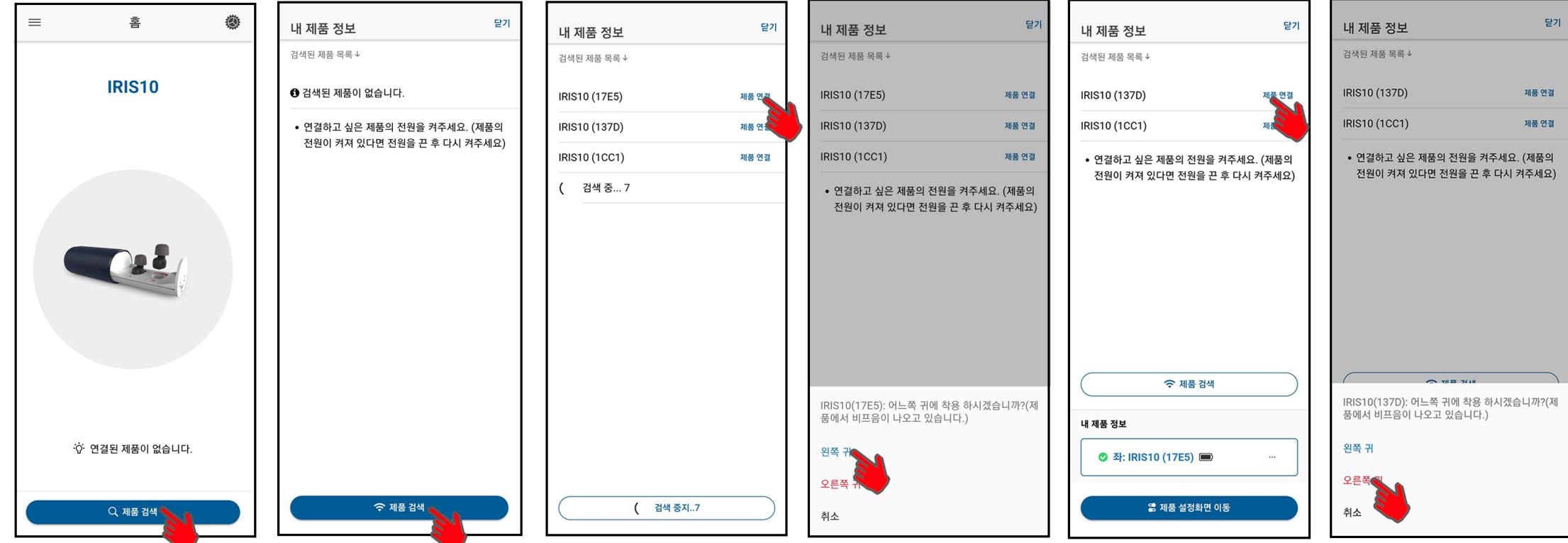

청력 검사

홈 화면 상단 오른쪽 선택 > 청력 검사 선택

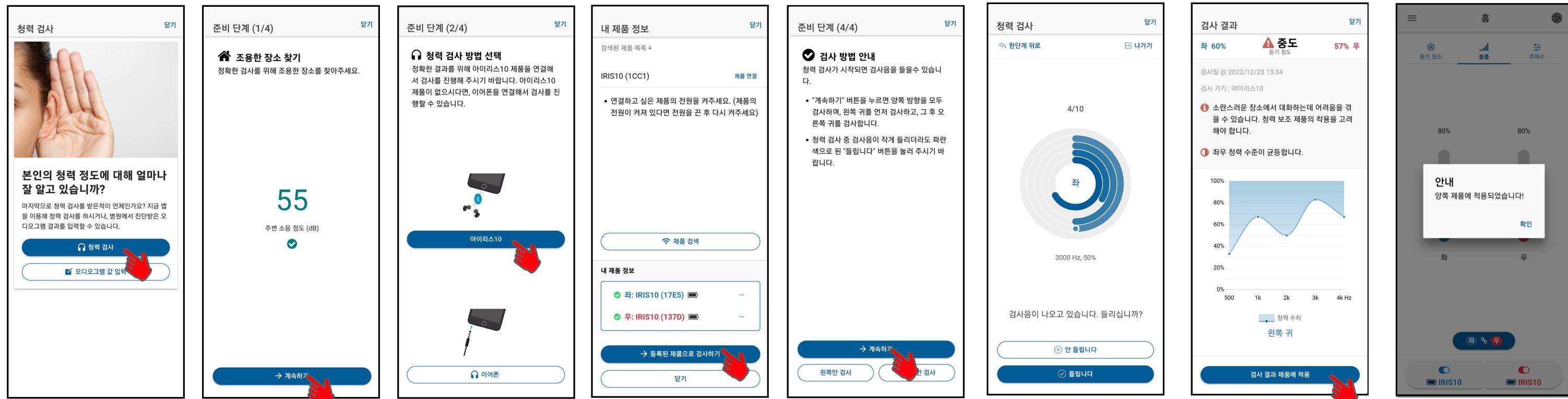


듣기 모드



4가지 모드 설정


볼륨

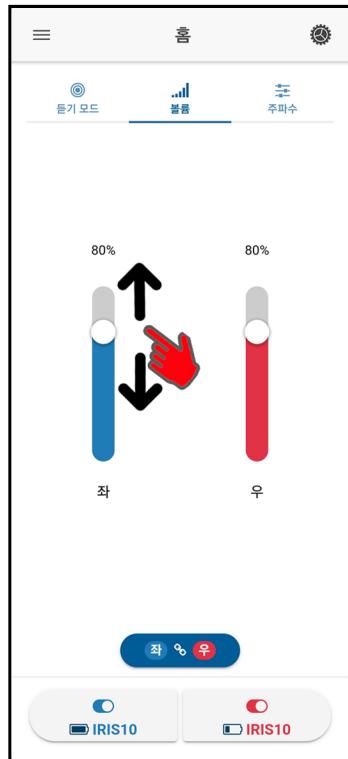

양방향 동시 조절

방향별 조절

주파수

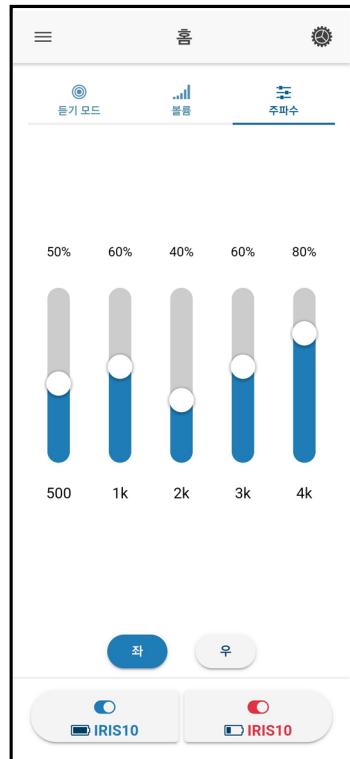

청력 검사 완료 후 자동으로 설정

오디오그램


홈 화면 상단 오른쪽 선택 > 청력 검사 선택

TIP. 병원에서 청력 검사 후 오디오그램 값을 직접 입력하여 사용 가능

청력 검사 내역

홈 화면 상단 오른쪽 선택 > 청력 검사 내역 선택

TIP. 가장 최근에 사용한 오디오그램 또는 청력 검사 결과 다시 적용 가능

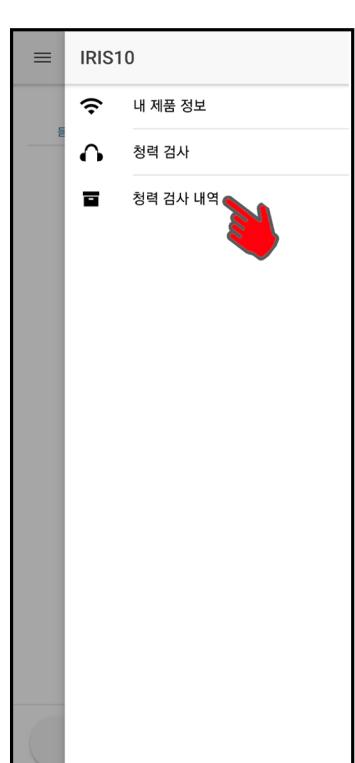

오디오그램 다시 적용



청력 검사 내역



청력 검사 다시 적용



청력 검사 내역



청력 검사 내역